

HYCISUN[®]



Anbio Biotech

COVID-19 Antigen Schnelltest (Kolloidales Gold) Schnelltest (Spucktest) für die Eigenanwendung

REF A6061213



Test zur Eigenanwendung - Befristete Sonderzulassung zur
Eigenanwendung nach §11 MPG in Deutschland (BfArM GZ:
5640-S-058/21)

HYGISUN[®]

EAN: 4260676530614



1 PCS/box

500 Box/ctn

6000 PCS/pallet

Contents tests**Kit****COVID-19 Antigen Test Card****1 test****Extraction Solution****1 ml / tube****Saliva collection device****1****Instruction for Use****1****Plastic Dropper****1**

Anbio (Xiamen) Biotechnology Co., Ltd.

REF A6061213

HYCISUN®



Anbio Biotech

COVID-19 Antigen Schnelltest (Kolloidales Gold)

Schnelltest (Spucktest) für die Eigenanwendung

Rapid COVID-19 Antigen Test (Colloidal Gold)

Saliva test for personal use

Packungsinhalt: **1** TEST
Package: **1** TEST

IVD



Anbio (Xiamen) Biotechnology Co., Ltd.
No. 2016, Wengshu West Road, Xinyang
Street, Huiyang District, Xiamen, Fujian,
China

CE 94/87

Ludke M. & V.
Königsplatz 11, 14195 Berlin, 10557
The Hague, Netherlands



Sarstedt International GmbH
Schulstrasse 12, 52148, Wusterhausen, Germany

Packungsinhalt: **1** TEST
Package: **1** TEST

IVD





Anblo (Xiamen) Biotechnology Co., Ltd.
No.2016, Wengjiao West Road, Xinyang
Street, Haicang District, Xiamen, Fujian,
China

EC REP

Lotus NL B.V.
Koningin Julianaplein 10, 1e Verd, 2595AA,
The Hague, Netherlands

IMPORTEUR

Sunbeam International GmbH
Schumanstr.12, 52146, Würselen, Germany



4 260676 530614



Verwendungszweck:

Das Kit dient zum qualitativen Nachweis von SARS-CoV-2-Antigenen im menschlichen Speichel in vitro.

Hauptkomponenten:

Testkassette verpackt im Folienbeutel, Einweg-Pipette, Speichelsammelgefäß mit 1ml Extraktionslösung, Trichter, Bedienungsanleitung.

Qualitätsstandard: IVDD 98/79 / EC

ANTIGEN SCHNELLTEST (SPEICHELTEST)

- ALLE NOTWENDIGEN REAGENZIEN ENTHALTEN
- HOHE SENSIBILITÄT UND SPEZIFITÄT

WICHTIGE HINWEISE

- SIE SOLLTEN MINDESTENS 30 MINUTEN VORHER NICHTS ESSEN, RAUCHEN, KAUGUMMI KAUEN ODER ALKOHOLISCHE GETRÄNKE ZU SICH NEHMEN.

- SPÜLEN SIE IHREN MUND MIT WASSER AUS UND WARTEN SIE 10 MINUTEN.

TIPP: MASSIEREN SIE IHRE WANGEN UND REIBEN SIE IHRE ZUNGE AM GAUMEN, UM DIE SPEICHELSEKRETION ZU STIMULIEREN.

IVD

In Vitro Diagnostik Test



Gebrauchsanweisung beachten.



Nicht zur Wiederverwendung.

Test zur Eigenanwendung - Befristete Sonderzulassung zur Eigenanwendung
nach §11 MPG in Deutschland (BfArM GZ: 5640-S-058/21)



ERGEBNISANSICHT

SARS-CoV-2
Antigen



C

T



S

ID: _____

POSITIV

SARS-CoV-2
Antigen



C

T



S

ID: _____

SARS-CoV-2
Antigen



C

T



S

ID: _____

NEGATIV

LOT 2021026139



20210222



20230221



50530554



50540555

**COVID-19 Antigen Schnelltest
(Kolloidales Gold)
Schnelltest (Spucktest) für die Eigenanwendung**

**Rapid COVID-19 Antigen Test
(Colloidal Gold)
Saliva test for personal use**



Anbio (Xiamen) Biotechnology Co., Ltd.
REF A6061213

**COVID-19 Antigen Schnelltest
(Kolloidales Gold)
Schnelltest (Spucktest) für die Eigenanwendung**

**Rapid COVID-19 Antigen Test
(Colloidal Gold)
Saliva test for personal use**



Packungsinhalt:
Package: **1 TEST**



Anblo (Xiamen) Biotechnology Co.,Ltd

Package: 1 Test

**Rapid COVID-19 Antigen Test
(Colloidal Gold)**

LOT 2021016132

 20210112

 20230111

IVD

 2-30°C



CE

IVD

50°C



