

Gebrauchsanweisung, bitte aufmerksam lesen!

VirX Antiviren Nasen Spray

Zweckbestimmung: VirX Antiviren Nasen Spray ist ein Medizinprodukt zur Anwendung in der Nasenhöhle als schützende mechanische und chemische Barriere gegen Viren wie Sars-CoV-2 und andere Erkältungs- oder Grippe-Viren.

bitte lesen Sie diese Gebrauchsanweisung aufmerksam, bevor Sie das Medizinprodukt verwenden, denn diese enthält wichtige Informationen, die Sie bei der Anwendung des Medizinproduktes beachten sollten. Bitte bewahren Sie diese Gebrauchsanweisung auf, damit Sie sich bei Bedarf erneut informieren können. Wenn Sie weitere Fragen haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt oder Apotheker.

1. Wann wird VirX verwendet?

VirX Antiviren Nasen Spray kann vor Viren schützen und sollte angewandt werden, bevor und/oder nachdem man sich in eine riskante Umgebung begibt wie öffentliche Verkehrsmittel, Gesundheitseinrichtungen, Restaurants, Großveranstaltungen, Einkaufszentren etc.). VirX kann präventiv 3-4 mal täglich angewandt werden oder bis zu 6 mal täglich nach einer möglichen Exposition eines Virus. Dabei wird jedes Nasenloch je mit 2 Pumpstößen behandelt. Die Dauer der ununterbrochenen Anwendung sollte 30 Tage nicht überschreiten.

2. Welche Eigenschaften hat VirX?

Die Nase und auch die Mundhöhle sind häufige Eintrittspforten für Sars-CoV-2 Viren und ähnliche Erreger, die virale Infektionskrankheiten wie COVID-19, Influenza, Grippe oder grippale Infekte auslösen. Dringen diese Viren in die Nase ein, können sie sich an der Schleimhaut festsetzen und die dort ansässigen Zellen infizieren. Dort kommt es dann auch zu einer Vermehrung und Verbreitung dieser Viren. VirX ist ein Nasenspray mit antiviralen Eigenschaften, das Viren abtötet und es schafft eine physische Barriere zu bilden, die das Eindringen von Viren in den Körper verhindert. VirX wurde wissenschaftlich getestet und tötet nachweislich 99,9 % der Viren, die Atemwegsinfektionen hervorrufen innerhalb von 2 Minuten abtötet.

VirX wurde klinisch getestet und hat sich als sicher für den menschlichen Gebrauch erwiesen.

VirX kann zusätzlich zu anderen Präventionsmethoden verwendet werden, als Teil einer Gesamtstrategie zum Schutz vor Viralen Infektionen. Beispielsweise kann VirX zusätzlich zur Handdesinfektion und zum Tragen einer Maske angewandt werden.

VirX ist ein Medizinprodukt, kein Arzneimittel. Es verursacht keine Schläfrigkeit.

3. Wer kann VirX anwenden?

VirX ist für Erwachsene und Kinder ab 12 Jahren geeignet.

4. Wann darf VirX nicht verwendet werden?

Bei Kindern unter 12 Jahren wird die Anwendung nicht ohne ärztliche Rücksprache empfohlen.

In der Schwangerschaft und Stillzeit wird die Anwendung nicht ohne ärztliche Rücksprache empfohlen.

Bei bekannter Überempfindlichkeit bzw. einer Allergie gegenüber den Inhaltsstoffen.

Bitte beachten:

- Um Kontaminationen zu vermeiden, sollte das Nasenspray nicht von weiteren Personen verwendet werden.
- Nur bis zu 6 mal täglich verwenden.
- Außerhalb der Reichweite kleiner Kinder aufbewahren.
- Kontakt mit den Augen vermeiden. Falls das Spray in Kontakt mit den Augen kommt, diese mit klarem Wasser auswaschen.
- Nicht herunterschlucken, nicht zum Schlucken anwendbar.
- Nach der Verwendung immer die Schutzkappe wieder auf das Spray aufsetzen.
- Falls Nebenwirkungen wie Kopfschmerzen, Nasenbluten, oder dauerhaftes Brennen auftreten, beenden Sie die Verwendung sofort. Wenn diese Nebenwirkungen dauerhaft auftreten, konsultieren Sie einen Arzt.
- Von Feuer fernhalten.

5. Wie ist VirX aufzubewahren?

Bewahren Sie VirX bei Raumtemperatur auf, frieren Sie es nicht ein. Verwenden Sie es nur bis zum angegebenen Verfallsdatum oder bis zu 60 Tage nach dem ersten Öffnen.

6. Wie wird VirX verwendet?

Zum Schutz vor Viren kann VirX präventiv 3-4 mal täglich angewandt werden oder bis zu 6 mal täglich nach einer möglichen Exposition eines Virus. Dabei wird jedes Nasenloch mit je 2 Pumpstößen behandelt. Die Dauer der ununterbrochenen Anwendung sollte 30 Tage nicht überschreiten.

Bitte beachten: VirX Antiviren Nasenspray kann nicht mit anderen Personen gemeinsam verwendet werden, damit keine Viren oder Keime von einer Person auf eine andere übertragen werden.

VirX Antiviren Nasenspray enthält 25ml Flüssigkeit.

Die Wirkung tritt sofort nach der Anwendung auf.

Vor der ersten Anwendung, bereiten Sie den Einsatz des Sprays vor, indem Sie einen oder mehrere Sprühstoß in die Luft abgeben, bis ein konsistentes Sprühstoß feststellbar ist.

Bitte nehmen Sie an der Kundenumfrage unter folgendem Link teil: <https://sanotize.com/customer-survey/>